


GEBRUIKSAANWIJZING:


Poets uw tanden op de eerste dag VÓÓR het gebruik van Ionic White.

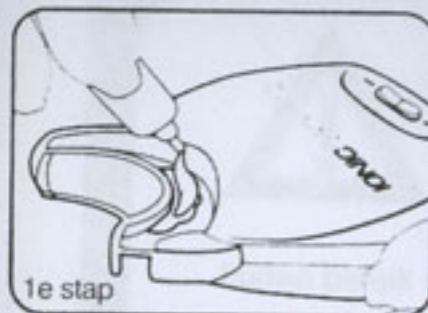

1e stap

1e stap: snijd de punt van de tube Whitening Gel en verdeel de complete inhoud van de tube op het midden van het mondstuk van het Ionic White-apparaat. Breng de gel alleen op het oppervlak van het mondstuk aan. De gel verdeelt zich vervolgens vanzelf tot aan de onderste tanden.

(Voorzichtig: de inhoud staat onder druk. Houd de tube van uw gezicht weg wanneer u de punt van de tube Whitening Gel verwijdt!)

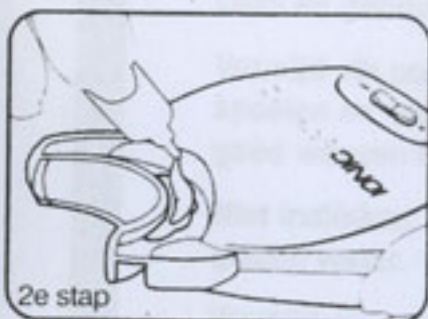

2e stap

2e stap: snijd de punt van de tube Whitening Gel Accelerator en verdeel de complete inhoud van de tube op het midden van het mondstuk over het Whitening Gel.

(Opmerking: het kan zijn dat de tubes met de Whitening Gel en de Whitening Gel Accelerator eventueel niet tot aan het maximum gevuld zijn.)



3e stap

3e stap: neem het Ionic White-apparaat in de mond en schakel het licht in. Laat het licht ingeschakeld totdat het (na ongeveer 2 minuten) automatisch dooft. Zo verkrijgt u een optimaal resultaat.

Neem het Ionic White-apparaat uit de mond.




4e stap

4e stap: houd de resterende gel nog 5-7 minuten in de mond en spoel uw mond vervolgens met water uit.

5e stap: herhaal de stappen 1 t/m 4 daarna nog twee keer.

OM DUURZAAM MAXIMAAL EFFECT TE BEREIKEN

Gebruik de aanbevolen Whitening Rinse en Whitening Rinse Accelerator een tot twee keer per week, zodat uw glimlach stralend wit en fris blijft.

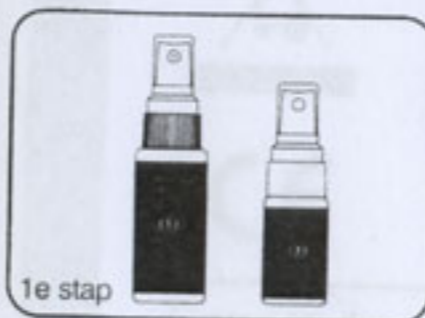

1e stap

1e stap: gebruik 6 Whitening Rinse-sprays en onmiddellijk daarna 2 Whitening Rinse Acceleratorsprays voor uw tanden.



2e stap

2e stap: neem het Ionic White-apparaat in de mond en schakel het licht in dat na 2 minuten automatisch uitschakelt.



3e stap

3e stap: houd de gels gedurende 2 minuten in de mond en spoel uw mond vervolgens met water uit en glimlach!

Gebruik de Ionic White-producten vaker wanneer u rookt, koffie, thee of limonade drinkt of andere producten gebruikt die tandverkleuringen veroorzaken.



BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Buiten bereik van kinderen houden.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voor gebruik.

Vermijd elk contact met de ogen. Indien de gel in de ogen komt, langdurig spoelen en een arts raadplegen: Als de gel in contact komt met de huid: goed wassen met water en zeep.

Niet inslikken. Wanneer er sprake is van inslikken, drink dan meerdere glazen water.

Vermijd elk contact van de actieve oppervlakte van het witmakende product met tandvlees en of speeksel. (Gel of spoelingsmiddelen niet inslikken).

Stop met het gebruik bij irritaties, rood worden, opzwellen, of gevoelig worden van mond of tandvlees en raadpleeg een arts.

Dit product bevat zilver- en/ of zilver-ionen. Vermijd elk contact met een beschadigde huid.

Gebruik de kit niet langer dan aanbevolen. Gebruik niet vaker dan aanbevolen. Verifieer de lijst met ingrediënten voor mogelijke allergieën.

Tijdens gebruik is het mogelijk dat u een tijdelijke gevoeligheid constateert.

Ionic White maakt alleen natuurlijke tanden wit. Het maakt kronen, glazuur of protheses niet witter. Kleurverschillen kunnen dan geconstateerd worden.



Gooi uw elektronische of elektrische apparaten niet met het normale huisvuil weg. U dient de desbetreffende plaatselijke voorschriften in acht te nemen.

Elektrische of elektronische apparaten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten en mogelijke effecten hebben op milieu en de gezondheid.

Vraag informatie bij uw gemeente over het recyclen van dit apparaat.



Ingrediënten :

Whitening Gel (Witmakende gel)

Aqua, Lithium Magnesium Sodium Silicate, Citric Acid, Hydrogen Peroxide en Mentha Aquatica Extract

Whitening Gel Accelerator (Versnellingsgel)

Aqua, Tromethamine, Lithium Magnesium Sodium Silicate, Mentha Aquatica Extract en Silver Ion

Whitening Rinse (Stay White spray 1)

Aqua, Hydrogen Peroxide en Mentha Aquatica Extract

Whitening Rinse Accelerator (Stay White spray 2)

Aqua, Tromethamine, Mentha Aquatica Extract en Silver Ion

Verkocht door :
INOVENTYS
14, avenue de l'Opéra
75001 Paris - FRANKRIJK

Gefabriceerd door :
Milestone Scientific
220 South Orange Avenue
Livingston, NJ 07039 – Verenigde Staten

Contact : E-mail : ionicwhite@inoventys.com



32°-99,5° F
0°-37° C

Made in China